

Conseils d'entretien pour son appareillage

Notre matériel nécessite un entretien et **une surveillance régulière**. Nettoyez-le le plus régulièrement possible afin de lui garantir la meilleure longévité possible. Utilisez simplement **une éponge humide** sur toute la surface de l'orthèse, laissez sécher complètement l'ensemble avant de réutiliser. L'utilisation d'une "soufflette à air comprimé" est également conseillée pour dégager les résidus alimentaires ou autres

Les housses font parties intégrantes de nos appareillages. Elles améliorent le confort du patient, diminuent les problèmes de sudation et protègent l'installation. Les housses sont **lavables en machines à 30 degrés**. Evitez l'utilisation d'un sèche-linge.

Si votre appareillage dispose d'une finition **«tissus 3D»**:

- Placer l'habillage corset à l'intérieur de la housse (en option) puis refermer
- Lavage en machine à 30°
- Séchage en tambour interdit
- Ne pas utiliser de détergent
- Repassage interdit.

En cas de doute concernant l'entretien de votre appareillage: contactez-nous!

